


CONTACT CARE PEROXYDE

Soluzione al perossido di idrogeno con elevato potere battericida per una deterzione in profondità.

ADATTA A TUTTI I TIPI DI LENTI A CONTATTO, MORBIDE E RGP, ECCETTO PER LE COLORATE.

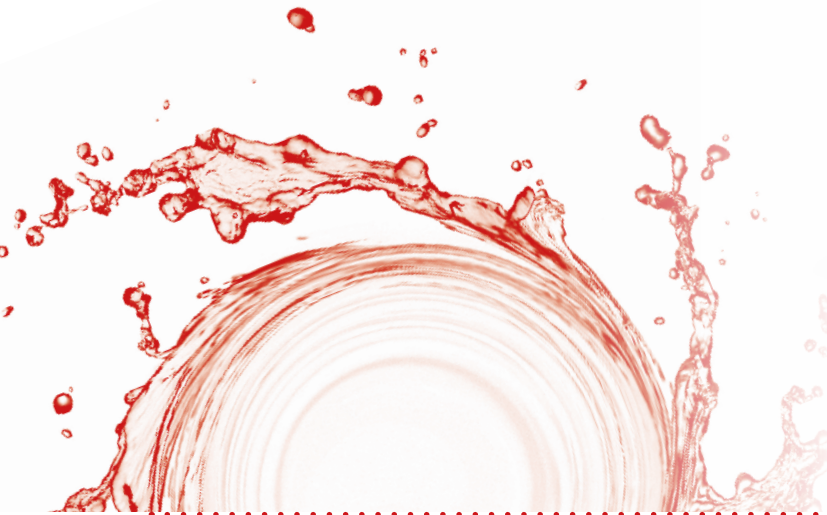

Funzione

Contact Care PEROXYDE è un sistema monofase al perossido di idrogeno con catalizzatore al platino indicato per la pulizia quotidiana, la rimozione delle proteine e la disinfezione di tutte le lenti a contatto, ad eccezione di quelle colorate/cosmetiche. **Contact Care PEROXYDE** gode di un elevato potere antibatterico e svolge un'azione di deterzione profonda, rimuovendo i depositi che quotidianamente si formano sulla superficie delle lenti a contatto. La reazione chimica tra il liquido e il suo catalizzatore (disco al Platino), trasforma il contenuto in acqua e ossigeno. In questo modo si ottiene una soluzione salina neutra che consente di indossare immediatamente le lenti a contatto.

Istruzioni per l'uso

1. Prima di toccare le lenti a contatto, lavare le mani con cura, risciacquandole e asciugandole bene.
2. Aprire il coperchio del comparto contrassegnato con la lettera L riponendo la lente sinistra nell'apposito spazio convesso. Richiudere il coperchio facendo attenzione a non schiacciare la lente e ripetere l'operazione con la lente DX (comparto R).
3. Riempire il contenitore dotato di dischetto catalizzatore con la soluzione **Contact Care PEROXYDE** fino alla marcatura.
4. Fare attenzione a non riempire troppo o troppo poco il contenitore.

5. Inserire il cestello nel contenitore delle lenti a contatto con la soluzione **Contact Care PEROXYDE**.
6. Chiudere il contenitore senza scuoterlo e tenerlo il contenitore in posizione verticale.
7. Il corretto funzionamento del prodotto prevede il rilascio di bollicine di ossigeno al contatto tra soluzione e stella catalitica all'interno del contenitore portalenti; in caso contrario non utilizzare il prodotto.
8. Lasciare agire la soluzione **Contact Care PEROXYDE** per almeno 6 ore oppure durante la notte (così la neutralizzazione sarà completa).
9. Se le lenti a contatto rimangono più di 24 ore in soluzione Contact Care, è necessario ripetere il processo di pulizia prima di inserirle negli occhi.
10. Una volta pulite e disinfettate, le lenti possono essere inserite negli occhi. Per occhi particolarmente sensibili, si consiglia di sciacquarle preventivamente con soluzione salina.
11. Gettare la soluzione usata. Risciacquare il contenitore e il cestello per lenti con soluzione salina e lasciarli asciugare aperti. Non usare mai acqua corrente.

Leggere sempre attentamente le precauzioni esposte nel foglietto illustrativo.

Composizione

Soluzione acquosa, isotonica e tamponata con Poloxamer, EDTA, PVP, Poliesanide 0,0002% e agente anti-deposito delle proteine.

Codice 360 ml: 960
Codice 100 ml: 164

Data dell'ultima revisione: 2009/11.